

Dycem®

Non-Slip 



Supace

El Original y Todavía el Mejor Producto Antideslizante





Un versátil, lavable y antideslizante material, que previene el deslizamiento y mejora el agarre. DYCEM Non-Slip está disponible en una variedad de formas, tallas, colores y grosores.

Entre los productos DYCEM destacamos la superficie antideslizante en rollo de 40 x 200 cm. como ayuda a la escritura, al juego, etc. Los tapetes de 35 x 25 cm. como soporte de platos y cubiertos, los discos de 19 cm. de ϕ como soporte de vasos etc. y la red para evitar el deslizamiento al usuario de sillas de ruedas, o de otros elementos de reposo.

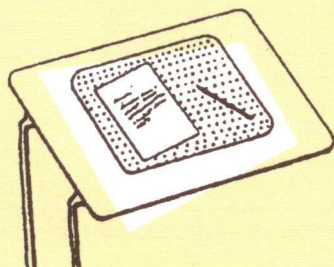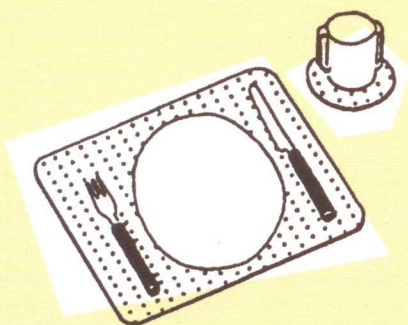


Uso tradicional de los tapetes y rollos DYCEM. El producto anti-deslizante Dycem mantiene fijo el plato mientras se come. Ideal para personas físicamente disminuidas a nivel de extremidades superiores débiles, o con reducida coordinación. Los tapetes pequeños pueden ser fácilmente llevado en el bolso cuando se vaya a comer fuera.

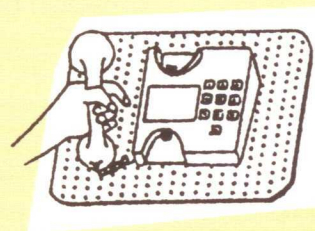

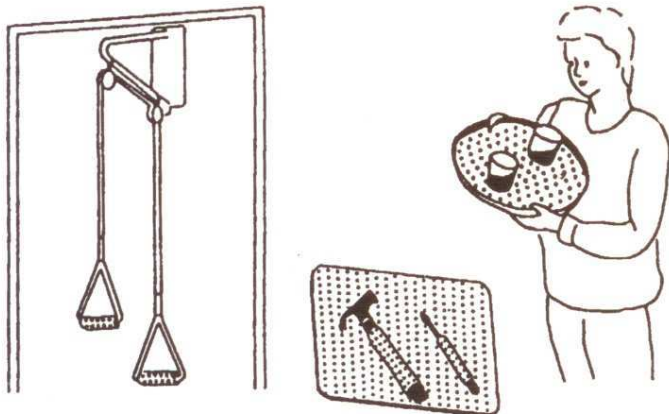

Utilice el rollo Dycem para forrar los mangos de utensilios varios. Con esto se consigue incrementar la fricción y la sensación feedback, así como aumentar el tamaño de la empuñadura, proporcionando una mayor seguridad de agarre.

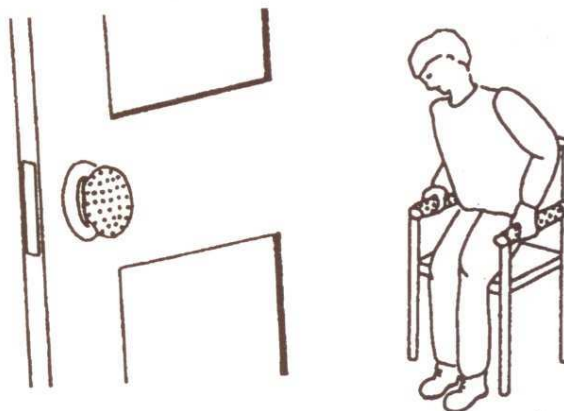

Ponga un trozo de Dycem en los pomos de las puertas para asirlas mejor, es igualmente eficaz para grifos duros y otras muchas aplicaciones.



Utilice colores diferentes, combinados para aumentar y mejorar la coordinación.

Utilice los tapetes Dycem para estabilizar el equipo, así como las extremidades durante las actividades. Para la reeducación del andar y otros ejercicios de equilibrio.




Forre los asientos y respaldos de las sillas con el rollo o la malla Dycem para evitar deslizamientos hacia adelante, o bien situe un trozo debajo del cojín. Ponga tapetes en los reposapiés de la silla, para ayudar a colocar y mantener los pies en la posición correcta.


DYCEM es un material plástico anti-deslizante, que ayuda a resolver muchos de los problemas de estabilidad y adherencia que ocurren en Centros Especiales, Hospitales, Clínicas, Centros Geriátricos y en domicilios particulares. Los productos DYCEM están fabricados en un poliéster especialmente desarrollado para tener un elevado coeficiente de fricción. Los productos DYCEM no son tóxicos, tienen colores sólidos, son inodoros y fáciles de lavar.

Instrucciones de lavado.

Lavar los productos regularmente con agua jabonosa, mejor jabón neutro. No utilizar el lavaplatos. Dycem es resbaladizo cuando está mojado, pero recupera toda su efectividad al estar limpio y seco.

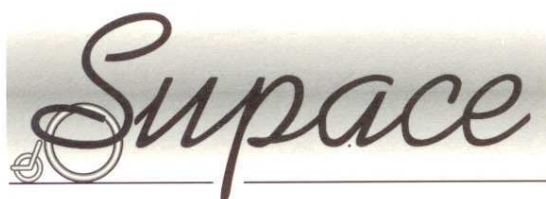

Escultor Llimona, 17 - 08031 Barcelona
Tels. (93) 357 04 27 / 357 02 68 - Fax (93) 357 02 68

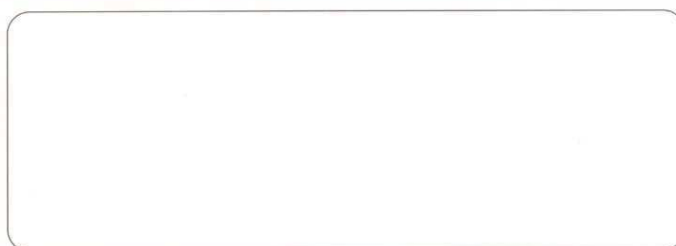

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso.